

Esta rotulagem é aplicável aos itens descritos a seguir:

Microcânulas Vida Bela é composto por 1 cânula, disponibilizadas nas seguintes dimensões: 0.3x25; 0.4x25; 0.4x40; 0.4x50; 0.5x40; 0.5x50; 0.6x30; 0.6x50; 0.7x50; 0.7x70; 0.8x25; 0.8x50; 0.8x70; 0.9x25; 0.9x50; 0.9x70; 1.2x70; 1.65x100

MICROCÂNULA VIDA BELA

MODELO: Cânulas	LOTE: XXXX
DATA DE FABRICAÇÃO: XX/XX/XXX	DATA DE VALIDADE: 05 anos
CONTEUDO: 20 unidades	
Produto Estéril. Esterilizado em Oxido de Etileno	
PROIBIDO REPROCESSAR	
<p>INSTRUÇÃO DE USO:</p> <p>Desinfetar o local onde será aplicado o ácido hialurônico ou substancia equivalente. Realizar uma punção no local da aplicação com a agulha de punção de mesma calibre ou maior da microcânula. Descartar a agulha e fazer uma marcação no local da punção para que o local fique visível para a aplicação do produto. Utilizando técnicas assépticas, abrir a embalagem da microcânula e acoplar o produto na seringa que contém o ácido hialurônico ou substancia equivalente (registro na ANVISA a parte). Penetrar no mesmo local da punção inicial, a microcânula de forma perpendicular a superfície da pele. Use a flexibilidade da microcânula para guia-la na pele tangencialmente ao comprimento desejado. Injetar o liquido de forma retrógrada, ventilando a área de tratamento. Se necessário, realizar a injeção em planos e direções diferentes até conseguir o efeito volumizante desejado. Retire a microcânula cuidadosamente da pele. Após o uso, descartar imediatamente o produto seguindo as regras de descartes da unidade hospitalar, descartando o produto em local apropriado para lixo hospitalar , considerando o produto potencialmente contaminado.</p>	
<p>ADVERTÊNCIAS:</p> <p>Produto de uso único. Proibido reprocessar. Produto fornecido estéril. Esterilizado por Óxido de Etileno. Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada. A esterilidade é garantida desde que a embalagem se encontre intacta. Não utilizar o produto após a data de validade. Não amassar. O produto deve ser utilizado somente com a orientação de cirurgião, seguindo técnicas cirúrgicas aplicáveis e só devera ser manipulado por pessoal qualificado.</p>	
<p>PRECAUÇÕES:</p> <p>Caso seja detectada qualquer alteração no produto, descarta-lo imediatamente e utilizar um novo produto. Tenha sempre uma segunda Microcânula reserva para esses casos. Manipular o produto em ambiente asséptico.</p>	
<p>CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO / CONSERVAÇÃO:</p> <p>Armazenar o produto em sua embalagem original, ao abrigo da luz solar , calor, livre de poeira</p>	

e umidade.
Não amassar.
Temperatura entre 05°C e 35°C.
Umidade relativa máxima de 65%.

FABRICANTE:

Medical Brokers Adam Cieslak Spolka Jawna

Ul. Lipowa 1- POLÔNIA- 95-100 Zgierz.

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:

Vida Bela Indústria e Comércio de Produtos
para Medicina e Estética LTDA.

CNPJ 78.323.623/0001-92

Rua Henrique Lage nº 573 , Centro , Criciúma
/SC, CEP 88801-010

Responsável Técnica : Mabel Pereira Guedin

CRF 5381 – SC

ANVISA nº 80325880001