



INSTRUÇÕES DE USO APLICADOR VIDA BELA

Distribuidor:

Vida Bela Indústria e Comércio de Produtos para Medicina e Estética
CNPJ: 78.323.623/0001-92
Rua Henrique Lage, 573 Sala 101
Criciúma – SC
88801-010
Telefone: (48)3437-9192
Email: comercial@vidabelamed.com.br

Fabricante:

Vida Bela Indústria e Comércio de Produtos para Medicina e Estética
CNPJ: 78.323.623/0002-73
Rua José Pedro Lino, 246
Içara – SC
88820-000
Tel: (48)3437-9192
Responsável Técnico: Daniela Philippi Pereira CRQ/SC 13304034
Registro na ANVISA sob o Nº: 81284569001

Produto não estéril. Artigo médico reutilizável.



Apresentação e Composição

O Aplicador Vida Bela é apresentada dentro de uma embalagem plástica.

A embalagem contém 1 (uma) unidade de Aplicador Vida Bela. O Aplicador consiste em um instrumento 100% composto de aço inoxidável 304.

Indicação

O Aplicador Vida Bela é indicado para injeções de produtos como ácido hialurônico, hidroxiapatita, polimetilmetacrilato entre outros produtos envasados em seringas de 1 ou 3mls.

Estocagem

Quando não estiver em uso, a Pistola deve ser mantida em local limpo e que não corra o risco de cair ou de ser pressionada.

Descrição do Produto

O aplicador Vida Bela é uma pistola que facilita a aplicação de produtos correlatos na estética médica. As seringas encaixam perfeitamente em sua base e com facilidade o profissional consegue aplicar o produto sem fazer força.

Instruções de Uso

Verifique se o aplicador está limpo e livre de sujidades.

Encaixe a cânula adequada correspondente ao produto que será utilizado na ponta do aplicador.

Se utilizada seringa de 1ml encaixa a ponteira item 7, se utilizada seringa de 3mls utilizar ponteira item 6. Basta girar para encaixar ou desencaixar.

Encaixe a seringa desejada na base da pistola puxando o empurrador para trás.


Verifique se os produtos estão bem encaixados e então aperte o gatilho suavemente até que a quantidade desejada seja inserida.

Restrições de Uso

Usar o produto somente para sua função designada de injeção de produtos aprovados pela ANVISA.

Uso profissional.

Imagens

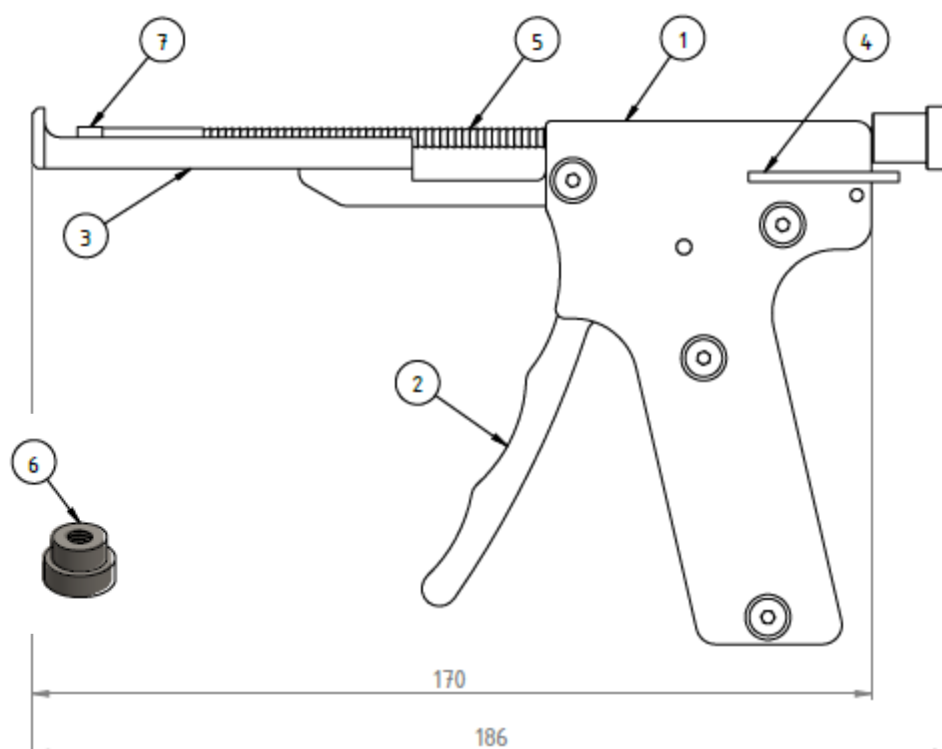

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QTDE	CÓDIGO
1	CORPO DA PISTOLA	AÇO INOX AISI 304	1	VDB1110
2	GATILHO	AÇO INOX AISI 304	1	VDB1120
3	SUPORE DA SERINGA	AÇO INOX AISI 304	1	VDB1130
4	TRAVA TRASEIRA	AÇO INOX AISI 304	1	VDB1115
5	EIXO EMPURRADOR	AÇO INOX AISI 304	1	VDB1140
6	PONTEIRA 3ml	AÇO INOX AISI 304	1	VDB1116
7	PONTEIRA 1 ml	AÇO INOX AISI 304	1	VDB1117

Procedimentos de Limpeza e Manutenção

Limpar após cada procedimento com toalha descartável e álcool 70°.



Advertências

Não forçar caso a pistola trave.

Não utilizar se qualquer parte estiver solta ou danificada.

Manter fora do alcance do fogo.

Garantia de Qualidade

A garantia é de seis meses para todas as partes, com exceção da mola que depende do número de procedimentos.